

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

## **Gebrauchsanweisung zu Deinem Dilator**

**WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.**

Anwendung: Dein Toy ist für das Training der Vaginalmuskulatur nach medizinischen Eingriffen und Krankheiten geeignet. Es hilft verloren gegangene Spannkraft, Elastizität und Flexibilität der Vaginalstruktur wiederaufzubauen oder zu verbessern. Einsteigerinnen beginnen mit der kleinsten Größe der Dilatoren und lassen diesen, mit der konischen Spitze voran, langsam in sich hineingleiten. Etwas Gleitgel ist dabei hilfreich. Ist der Vaginaltrainer einmal an Ort und Stelle, sollte er dort 5 bis 10 Minuten bleiben. Mit sanften Vor- und Zurückbewegungen sowie Rotationen wird die Vagina Schritt für Schritt gedehnt. Diese Übung sollte einmal täglich durchgeführt werden, um den erwünschten Effekt zu erzielen. Nach und nach kannst Du Dich langsam an die größeren Dilatoren herantasten.

## **Spezifikationen zu Artikelnummer 008547DI**

Gewicht brutto (in g): 176; Gewicht netto (in g): 170

Länge min (in mm): 225; Länge max (in mm): 225

Schaftlänge min (in mm): 175; Schaftlänge max (in mm): 175

Durchmesser min (in mm): 18; Durchmesser max (in mm): 35

Material: Silikon

Reinigungshinweis: Reinige Dein Toy oberflächlich mit einem feuchten Tuch. Nutze danach einen speziellen Reiniger wie ToySterile: Einsprühen, kurz einwirken lassen, mit einem fusselfreien Tuch abwischen.

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Kunden in Deutschland nutzen dafür die E-Mail Adresse [info@eis.de](mailto:info@eis.de), Kunden in Österreich die E-Mail Adresse [info@eis.at](mailto:info@eis.at).

## **Warn- und Sicherheitshinweise:**

Das Toy ist ein Sexspielzeug für Erwachsene und kein Produkt mit medizinischer oder sonstiger Heilwirkung. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Beachtung der genannten Punkte sowie der hier aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise:

Verletzungsgefahr durch Piercings oder Schmuck!

Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch von Lovetoys, wenn diese sonst störend sind.

Verletzungsgefahr bei gereizter oder verletzter Haut!

Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten.

Verletzungsgefahr bei Kindern!

Bewahre Dein Toy außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Das Produkt ausschließlich gemäß der Gebrauchsanweisung benutzen und bedienen, nicht zweckentfremden!

- Das Produkt ist vor und nach jeder Benutzung zu reinigen.

- Im Falle einer Schwangerschaft, Allergie, bei Diabetes, Gefäßerkrankungen, Blutgerinnungsstörungen, bei Problemen im Zusammenhang mit der Anwendung o.ä. konsultiere vor der Verwendung des Toys Deinen zuständigen Arzt.

Hinweis zur Garantie: Wir bieten Dir 10 Jahre Garantie auf unsere Artikel! Sollte innerhalb von 10 Jahren nach Deinem Einkauf im Eifer des Gefechts doch einmal etwas kaputtgehen, kannst Du die defekte Ware jederzeit an uns zurücksenden und wir erstatten Dir den vollen Kaufpreis zurück. Ausgeschlossen von der Garantiezeit sind Kondome, Gleitmittel, Massageöl, Aphrodisiaka und Aktionsprodukte. Durch diese Garantie werden Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

nicht eingeschränkt. Zudem geben wir Dir nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen 14-tägigen Widerrufsrechts ein zusätzliches 365-Tage Geld-Zurück-Versprechen auf alle Artikel!

Triple A Import GmbH

Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld

E-Mail für Kunden in Deutschland: [info@eis.de](mailto:info@eis.de)

E-Mail für Kunden in Österreich: [info@eis.at](mailto:info@eis.at)