

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

Gebrauchsanweisung zu Deinen Kondomen

WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.

Anwendung: Das Kondom ist zur Verwendung während des vaginalen Geschlechtsverkehrs vorgesehen. Öffne vorsichtig die Verpackung und entnimm das Kondom. Achte beim Öffnen darauf, das Kondom nicht mit den Fingernägeln oder anderen spitzen Gegenständen zu beschädigen. Greife das Reservoir mit Zeigefinger und Daumen und setze das Kondom mit der Innenseite auf das steife Glied. Nun rolle das Kondom, während Du das Reservoir zusammendrückst, vollständig bis zu Peniswurzel ab. Wenn das Reservoir genügend Platz für das Ejakulat hat und das Kondom luftbläschenfrei am Penis anliegt, sitzt es perfekt. Achte beim Aufziehen des Kondoms stets darauf, die richtige Seite zu verwenden. Solltest Du das Kondom versehentlich mit der Außenseite angesetzt haben, muss ein neues Kondom verwendet werden, da sich bereits Samen auf der Kondomaußenseite befinden könnten. Nach dem Geschlechtsverkehr sollte der Penis vorsichtig aus der Vagina herausgezogen werden. Halte dabei das Kondom mit den Fingern fest, sodass es beim Herausziehen nicht abrutscht und sich in der Vagina entleert. Das Kondom ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und muss nach der Verwendung im Hausmüll entsorgt werden. Nach Entfernung des Kondoms gründlich Hände und Penis waschen, um alle Samenrückstände zu entfernen. Nach Ablaufdatum nicht mehr verwenden. Sollte die Verpackung Schäden aufweisen, das Kondom nicht mehr verwenden.

Spezifikationen

Inhalt (in Stk): 12

Material: Naturkautschuklatex

Länge (in mm): 180

nominale Breite (in mm): 53

Warn- und Sicherheitshinweise:

- Das Kondom ist zur Verwendung während des vaginalen Geschlechtsverkehrs vorgesehen.
- Das Kondom ist nicht für eine Verwendung mit Lovetoys vorgesehen
- Achte beim Öffnen der Verpackung sowie beim Überziehen des Kondoms darauf, das Kondom nicht mit den Fingernägeln oder anderen spitzen Gegenständen zu beschädigen.
- Achte beim Aufziehen des Kondoms stets darauf, die richtige Seite zu verwenden.
- Solltest Du das Kondom aus Versehen mit der Außenseite angesetzt haben, muss ein neues Kondom verwendet werden, da sich bereits Samen auf der Kondomaußenseite befinden könnten.
- Das Kondom ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und muss nach der Verwendung im Hausmüll entsorgt werden.
- Nach Entfernung des Kondoms gründlich Hände und Penis waschen, um alle Samenrückstände zu entfernen.
- Nach Ablaufdatum nicht mehr verwenden.
- Sollte die Verpackung Schäden aufweisen, das Kondom nicht mehr verwenden.

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten wende Dich bitte an unseren Kundensupport, der Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen wird. Kunden in Deutschland nutzen dafür die E-Mail Adresse info@eis.de, Kunden in Österreich die E-Mail Adresse info@eis.at.

CE 0197

Amor Gummiwaren GmbH
August-Rost-Straße 4
99310 Arnstadt
info@amor.ag

Triple A Import GmbH
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld
E-Mail für Kunden in Deutschland: info@eis.de

EIS

Entdecke Deine Sinnlichkeit

E-Mail für Kunden in Österreich: info@eis.at